


# INTUBATION KIT AND TRANSPORT KIT FOR NEONATES / PEDIATRICS

## Instructions for Use


Fig. 1

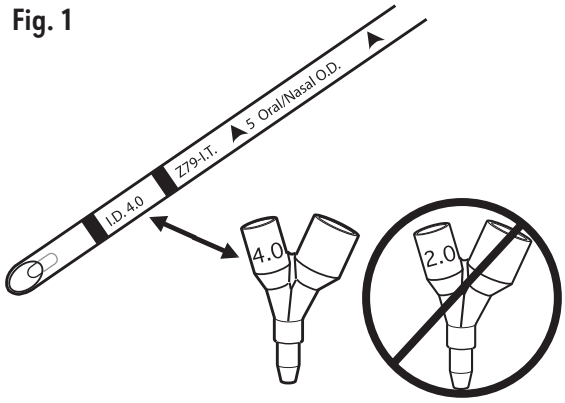

- EN Choose proper size
- FR Choisir la taille appropriée
- DE Passende Größe auswählen
- RU Выберите подходящая размер
- ES Seleccione el tamaño adecuado
- CS Zvolte správnou velikost
- DA Vælg korrekt størrelse
- ET Valida sobiv suurus
- EL Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος
- IT Scegliere la misura giusta
- LV Izvēlieties pareizo izmēru
- LT Pasirinkite tinkamą dydį
- HU Válassza ki a megfelelő méretet
- NL Kies de juiste grootte

- NO Velg riktig størrelse
- PL Wybrać właściwy rozmiar
- PT Escolher o tamanho adequado
- RO A se alege dimensiunea potrivită
- RU Подберите подходящий размер
- CS Zvolte správnou velikost
- SL Izberite primerno velikost
- FI Valitse oikea koko
- EL Βάλι ράττ storlek
- TR Uygun boyu seçin
- JA 適切なサイズを選びます
- KO 올바른 크기를 선택하십시오
- ZH 选择适当的尺寸


Fig. 2

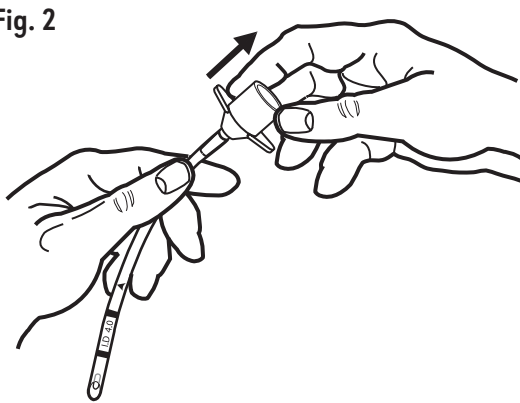

- EN Remove adapter
- FR Retirer l'adaptateur
- DE Adapter entfernen
- RU Отстраните адаптора
- ES Retire el adaptador
- CS Odstraňte adaptér
- DA Tag den eksisterende studs af
- ET Eemaldada adapter
- EL Αφαιρέστε τον προσαρμογέα
- IT Rimuovere l'adattatore
- LV Noņemiet adapteri
- LT Nuimkite adapterį
- HU Vegye le az adaptert
- NL Verwijder de adapter

- NO Fjern adapter
- PL Wyjąć adapter
- PT Retirar o adaptador
- RO A se scoate adaptorul
- RU Выньте адаптер
- CS Odstraňte adaptér
- SL Odstranite vmesnik
- FI Poista sovite
- EL Αβλάγσνα adaptern
- TR Adaptörü çıkartın
- JA アダプターを取りはずします
- KO 어댑터를 제거하십시오
- ZH 取下适配器


Fig. 3

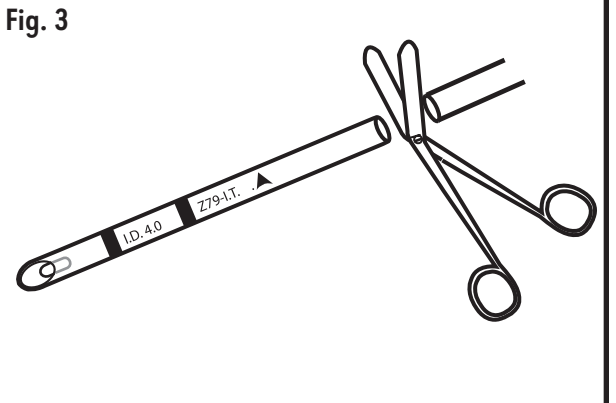

- EN Trim tube
- FR Recouper le tube
- DE Schlauch zuschneiden
- RU Подрежьте трубку
- ES Recorte el tubo
- CS Přistříhnete trubici
- DA Klip slangen til
- ET Kärpida sondi
- EL Κόψτε τον σωλήνα
- IT Scorciare il tubo
- LV Nogrieziet zondi vajadzīgā garumā
- LT Patrumpinkite vamzdelį
- HU Vágja le a szondát
- NL Knip de sonde

- NO Klipp røret
- PL Uciąć rurkę
- PT Aparar o tubo
- RO A se ajusta tubul
- RU Обрежьте трубку
- CS Přistříhnete trubici
- SL Odrežite cevko
- FI Katkaise letku
- EL Πυτσα sonden
- TR Boruyu kısıtın
- JA チューブを切ります
- KO 튜브를 자르십시오
- ZH 剪断管路


Fig. 4

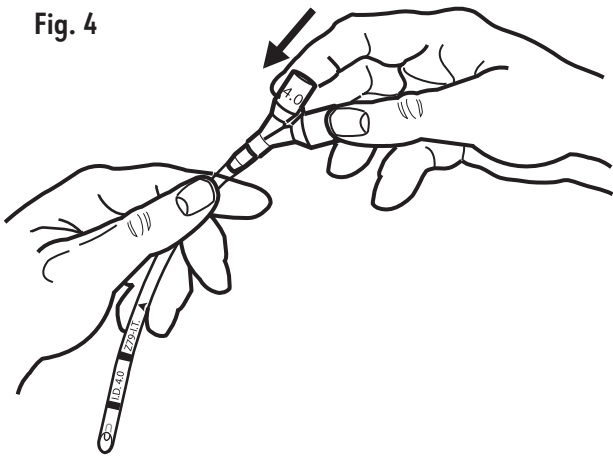

- EN Insert Y
- FR Introduire la sonde en Y
- DE Y-Anschluss einführen
- RU Вкарайте Y-образная адаптер
- ES Inserte el bifurcador
- CS Zaveďte spojku tvaru Y
- DA Sæt Y-stykket i
- ET Sisestada Y-konnektor
- EL Εισαγάγετε τον υοειδή σωλήνα
- IT Inserire l'adattatore a "Y"
- LV Ievadiet Y
- LT Įstatykite Y pavidalo adapterį
- HU Helyezze be az Y elemet
- NL Breng het Y-stuk in

- NO Sett inn Y
- PL Włożyć Y
- PT Introduzir o tubo em Y
- RO A se introduce adaptorul in Y
- RU Введите Y-образный катетер
- CS Zaveďte spojku tvaru Y
- SL Vstavite člen Y
- FI Kiinnitä Y-liitin
- EL För in Y:et
- TR Y'yi sokun
- JA Y型を挿入します
- KO Y관을 삽입하십시오
- ZH 插入Y型适配器


Fig. 5

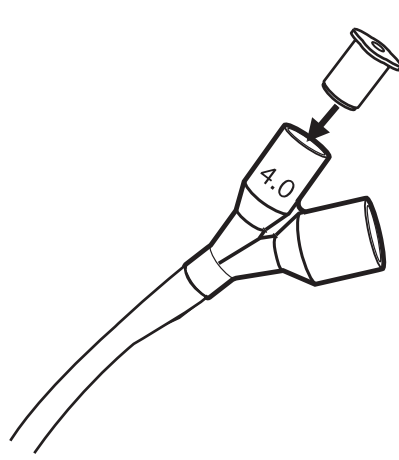

- EN Insert plug
- FR Introduire l'obturateur
- DE Pfropfen einsetzen
- RU Поставьте запушалката
- ES Inserte el tapón
- CS Zaveďte zátku
- DA Sæt proppen i
- ET Paigaldada sulgur
- EL Εισαγάγετε το πώμα
- IT Inserire il tappo
- LV Ielieciet aizbāzni
- LT Įstatykite kaištuką
- HU Helyezze be a dugaszt
- NL Breng de stop in

- NO Sett inn plugg
- PL Włożyć zatyczkę
- PT Introduzir o obturador
- RO A se introduce dopul
- RU Введите штекер
- CS Zaveďte zátku
- SL Vstavite čep
- FI Kiinnitä tulppa
- EL För in pluggen
- TR Tıpaı sokun
- JA プラグを挿入します
- KO 플러그를 삽입하십시오
- ZH 插入插头


Fig. 6

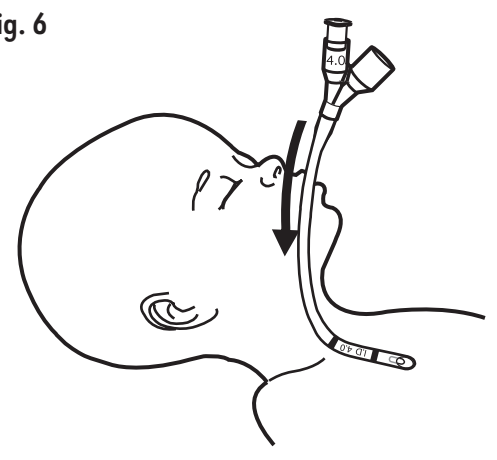

- EN Advance Endotracheal Tube
- FR Faire progresser la sonde endotrachéale
- DE Endotrachealen Schlauch einführen
- RU Продвигайте вперед эндотрахеальную сонда
- ES Haga avanzar el tubo endotraqueal
- CS Posuňte endotracheální trubici
- DA Før endotrakealslangen ind
- ET Viia sisse endotrakeaalne sond
- EL Προωθήστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα
- IT Fare avanzare il tubo endotracheale
- LV Ievadiet endotraheālo zondi
- LT Įstatykite endotrachėjinį vamzdelį
- HU Tolja be az endotracheális szondát
- NL Voer de endotracheale sonde op

- NO Før fram endotrakealtuben
- PL Wsunąć rurkę dotchawiczą
- PT Fazer avançar o tubo endotraqueal
- RO A se împinge tubul endotraheal
- RU Продвините эндотрахеальную трубку
- CS Posuňte endotracheální trubici
- SL Vtiahnite cevko porinite v bolnika
- FI Työnnä trakeaalitubettasi sisään
- EL För in endotrakealtuben
- TR Endo Trakeal Boruyu İlerletin
- JA 気管内チューブを挿入します
- KO 기관내 튜브를 밀어 넣으십시오
- ZH 推进气管内管路


Fig. 7

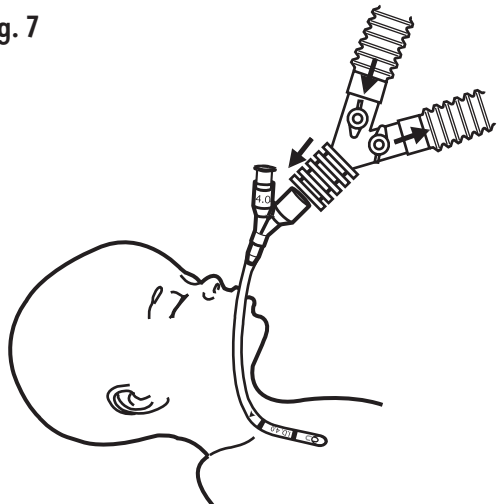

- EN Attach circuit
- FR Raccorder le circuit
- DE An Versorgungskreislauf anschließen
- RU Прикрепите междинного звено
- ES Acople el circuito
- CS Připojte obvod
- DA Tilslut kredsløb
- ET Ühendada tsirkulatsioon
- EL Συνδέστε το κύκλωμα
- IT Collegare il circuito
- LV Pievienojiet ierīci
- LT Prijunkite grandinę
- HU Csatlakoztassa az oxigénellátó kört
- NL Breng het circuit aan

- NO Fest krets
- PL Podłączyć obieg powietrza
- PT Prender o circuito
- RO A se ataşa circuitul
- RU Подсоедините систему трубок
- CS Připojte obvod
- SL Priključite respirator
- FI Kiinnitä piiri
- EL Ανσλут kretsen
- TR Devreyi bağlayın
- JA 回路を取り付けます
- KO 회로를 부착하십시오
- ZH 连接环路


Fig. 8

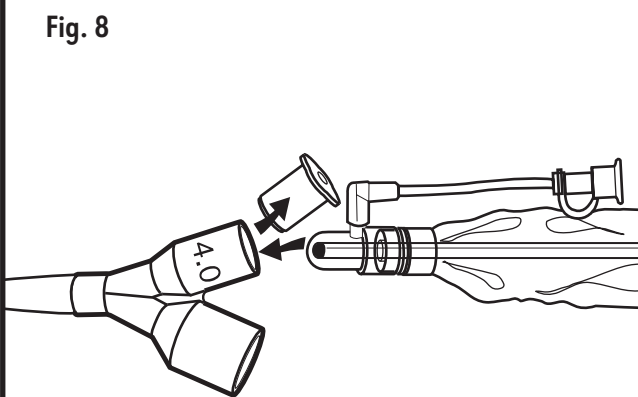

- EN Remove plug and insert catheter
- FR Retirer l'obturateur et introduire le cathéter
- DE Pfropfen entfernen und Katheter einsetzen
- RU Отстраните запушалката и вкарайте катетър
- ES Quite el tapón e inserte el catéter
- CS Vytáhněte zátku a zaveďte katétr
- DA Tag proppen ud, og sæt katetret i
- ET Eemaldada sulgur ja sisestada kateeter
- EL Αφαιρέστε το πώμα και εισαγάγετε τον καθετήρα
- IT Rimuovere il tappo e inserire il catetere
- LV Iznemiet aizbāzni un ielieciet katetru
- LT Ištraukite kaištuką ir įstatykite kateterį
- HU Vegye ki a dugaszt és helyezze be a katétert
- NL Verwijder de stop en breng de katheter in

- NO Fjern plugg og sett inn kateter
- PL Wyjąć zatyczkę i włożyć cewnik
- PT Retirar o obturador e introduzir o cateter
- RO A se scoate dopul și a se introduce cateterul
- RU Выньте штекер и введите катетер
- CS Vytáhněte zátku a zaveďte katétr
- SL Vytiahnite katétr a zaveďte zátku
- ODstranite čep in vstavite kateter
- FI Poista tulppa ja vie katetri sisään
- EL Αβλάγσνα pluggen och för in katetern
- TR Tıpaı çıkartın ve kateteri sokun
- JA プラグをはずし、カテーテルを挿入します
- KO 플러그를 제거하고 카테터를 삽입하십시오
- ZH 取下插头，插入导管

Fig. 9

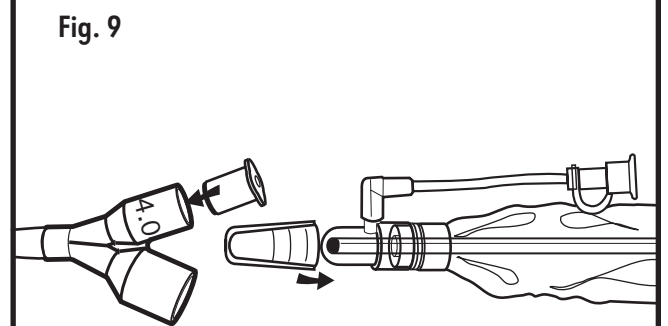

- EN Remove catheter and insert plug
- FR Retirer le cathéter et introduire l'obturateur
- DE Katheter entfernen und Propfen einsetzen
- RU Отстраните катетър и поставте запушалката
- ES Retire el catéter e inserte el tapón
- CS Vytáhněte katétr a zaveďte zátku
- DA Tag katetret ud, og sæt proppen i
- ET Eemaldada kateeter ja sisestada sulgur
- EL Αφαιρέστε τον καθετήρα και εισαγάγετε το πώμα
- IT Rimuovere il catetere e inserire il tappo
- LV Iznemiet katetru un ielieciet aizbāzni
- LT Ištraukite kateterį ir įstatykite kaištuką
- HU Vegye ki a katétert és helyezze be a dugaszt
- NL Verwijder de katheter en breng de stop in

- NO Fjern kateter og sett inn plugg
- PL Wyjąć cewnik i włożyć zatyczkę
- PT Retirar o cateter e introduzir o obturador
- RO A se scoate cateterul și a se introduce dopul
- RU Извлеките катетер и введите штекер
- CS Vytáhněte katétr a zaveďte zátku
- ODstranite kateter in vstavite čep
- FI Poista katetri ja kiinnitä tulppa
- EL Αβλάγσνα katetern och för in pluggen
- TR Kateteri çıkartın ve tıpaı sokun
- JA カテーテルをはずし、プラグを挿入します
- KO 카테터를 제거하고 플러그를 삽입하십시오
- ZH 取下导管，插入插头

