

Air-Q®3 Größen für Neugeborene



Air-Q®3 ist jetzt mit der kleinsten supraglottischen Atemwegshilfe für Ihre empfindlichsten pädiatrischen Patienten erhältlich. Die neuen Größen 0 und 0,5 sind als alle vier Air-Q3-Modelle erhältlich. Die selbstdichtende Option ermöglicht Einführen und Beatmung ohne zusätzliche Schritte und die Version für den Magenzugang hilft bei Sekreten und Luft im Magen.



AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISCHE ATEMWEGSHILFE

- Farbcodierter Anschluss zur einfachen Identifizierung der Größe. Der abnehmbare Anschluss ermöglicht das Einführen des Endotrachealtubus durch den Atemwegstubus.
- Anatomisch gebogener Atemwegstubus aus medizinischem Silikon mit integriertem Aufbiss.
- Exklusiver Epiglottis-Elevator hebt die Epiglottis für optimale Positionierung der Manschette an.
- Das selbstdichtende Aufblasen der Manschette wird durch den inspiratorischen/expiratorischen Druck gesteuert. Kein manuelles Aufblasen erforderlich.*

*Nur bei den Produkten Air-Qsp3 und Air-Qsp3G.

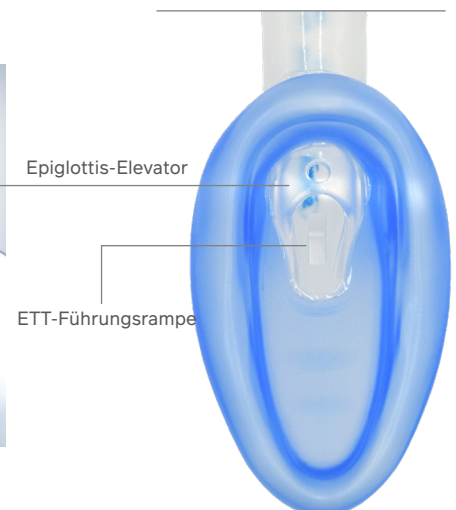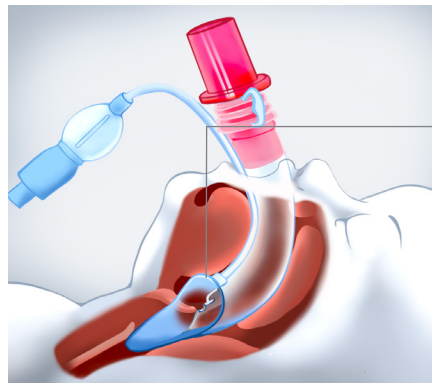

VIER MODELLE FÜR EINE REIHE VON INTUBATIONSANFORDERUNGEN:

- Air-Q®3 – Ermöglicht eine besonders einfache ETT-Positionierung, wenn eine unerwartete Intubation erforderlich ist.
- Air-Qsp3 – Verfügt über eine selbstdichtende Manschette, die eine Überdruckbeatmungsquelle nutzt. Bläst sich automatisch auf den patientenindividuellen optimierten Druck auf, um eine Abdichtung zu bilden.
- Air-Q3G – Verfügt über einen extra breiten Mageneingangs-zugang und zwei Magenkanäle, die OG-Sonden bis zu 6 Fr aufnehmen können.
- Air-Qsp3G – Verfügt über einen extra breiten Mageneingangs-zugang und zwei Magenkanäle, die OG-Sonden bis zu 6 Fr aufnehmen können. Enthält außerdem eine selbstdichtende Manschette, die die Nutzung einer Überdruckbeatmungsquelle ermöglicht.



AIR-Q®3 SUPRAGLOTTISCHE ATEMWEGSHILFE FÜR NEUGEBORENE MIT 15-MM-ANSCHLUSS

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	IDEALES KÖRPERGEWICHT	MAX. OETT	MUND-ÖFFNUNG	TUBUS-LÄNGE	MAX. OG-TUBUS	INFLATIONS-VOLUMEN
30005	Air-Q3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	—	0 – 0,5 mL
30055	Air-Q3	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	—	0 – 0,5 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	—	—
50005	Air-Q3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	5 Fr	0 – 0,5 mL
50055	Air-Q3G	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	6 Fr	0 – 0,5 mL
60005	Air-Qsp3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,0 cm	5 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2 – 4 kg	4,0 mm	8 mm	7,0 cm	6 Fr	—