

AIR-Q®3 YENİDOĞAN BOYUTLARI


Air-Q®3, en hassas bebek hastalarınız için en küçük supraglottik havayolları ile mevcuttur. Yeni boyut 0 ve 0,5 dört Air-Q®3 stiline tamamlanır. Kendiliğinden basınçlanan seçeneği ek adımlar olmadan yerleştirme ve ventilasyona izin verir ve gastrik erişim versiyonu midedeki sekresyonlara ve havaya yardımcı olur.



AIR-Q®3 SUPRAGLOTTİK HAVAYOLLARI


- Kolay boyut saptama için renk kodlu konektör. Çıkarılabilir bağlı konektör endotrakeal tüpün hava yolu tüpünden yerleştirilmesini sağlar.
- Entegre ısırma bloğuna sahip anatomik olarak kıvrımlı medikal sınıf silikon havayolu tüpü
- Özel epiglottis kaldırıcı, kaf yerleştirmeyi maksimum seviyeye ulaştıracak şekilde epiglottisi kaldırır
- Kendiliğinden basınçlı kafın şişirilmesi inspiratuar/ekspiratuar basınç tarafından kontrol edilir. Manuel şişirme gerekmez.*

*Yalnızca Air-Qsp3 ve Air-Qsp3G ürünleri.

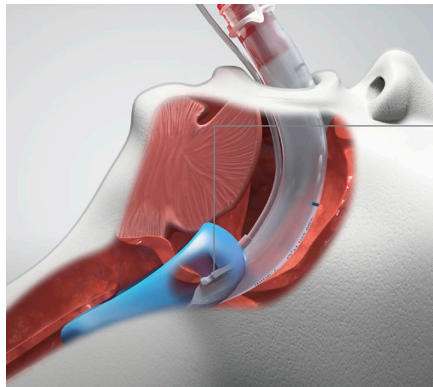

Epiglottis Kaldırıcı

ETT Kılavuz
Rampası

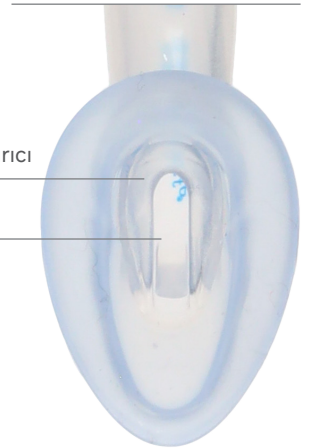

ÇEŞİTLİ ENTÜBASYON GEREKİNİMLERİ İÇİN DÖRT MODEL

- Air-Q®3 — Beklenmeyen bir entübasyon işlemi gerekli olduğunda ETT yerleştirmede göze çarpan kolaylık sağlar
- Air-Qsp3 — Pozitif basınçlı ventilasyon kaynağı kullanan kendiliğinden basınçlı bir kaf özelliğine sahiptir. Sızdırmazlık oluşturacak şekilde hastaya özel, optimize edilmiş basınçla göre otomatik olarak şişirir.
- Air-Q3G — Maksimum 18 Fr OG tüpleri barındıran çok geniş bir gastrik giriş ve iki gastrik kanal özelliğine sahiptir.
- Air-Qsp3G — Maksimum 18 Fr OG tüpleri barındıran çok geniş bir gastrik giriş ve iki gastrik kanal özelliğine sahiptir. Ayrıca pozitif basınçlı ventilasyon kaynağı kullanan kendiliğinden basınçlı bir kaf içerir.



15 MM KONEKTÖRLÜ AIR-Q®3 YENİDOĞAN SUPRAGLOTTİK HAVAYOLU

ÜRÜN	AÇIKLAMA	BOYUT	İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI	MAKSİMUM OETT	AĞIZ AÇIKLIĞI	TÜP UZUNLUĞU	MAKSİMUM OG TÜPÜ	ŞİŞİRME HACMİ
30005	Air-Q3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,43 cm	—	4 mL
30055	Air-Q3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,69 cm	—	7 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,43 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,69 cm	—	—
50005	Air-Q3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,43 cm	6 Fr	4 mL
50055	Air-Q3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,69 cm	6 Fr	7 mL
60005	Air-Qsp3G	0	< 2,0 kg	3,0 mm	5 mm	6,43 cm	6 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0,5	2-4 kg	4,0 mm	8 mm	7,69 cm	6 Fr	—