

AIRLIFE™ 非侵襲的換気 (NIV) フルフェイスマスク

ステップバイステップアプリケーションガイド

次の指示に従って、非侵襲的換気 (NIV) フルフェイスマスクを適切に固定してください。

1. マスクとヘッドギアをパッケージから取り出します。
2. マスクからヘッドギアのバックルの1つまたは両方を外します。
3. ヘッドギアを患者の頭部の上に置き、上部ヘッドギアストラップを快適な張力に調整します。(A)
4. プラスチック製バックルをマスクフレームに掛けます。(B)
5. 上部ヘッドギアストラップを快適な張力に調整します。(C)
6. 下部ヘッドギアストラップを快適な張力に調整します。(D)
7. オーバーヘッドストラップがずれないように正しい位置にあることを確認してください。(E)
8. マスク上部のフィンを握って、額用パッドを調整します。適切な調整により、マスクの安定性が向上し、圧力ポイントが最小限に抑えられます。(F)
9. 回路を接続し、NIV治療を開始します。
10. 過度のリークがないか確認し、必要に応じてマスクの装着を調整します。

マスクを患者から取り外すには、マスクの一方または両方のバックルを外して取り外します。

AirLife NIVマスクのフレキシブルな旋回エルボーは、マスクと患者の間のシールにかかるトルクを低減し、圧力ポイントを最小限に抑えます。



マスクが屈曲していない



マスクが屈曲している

本製品に関する詳細な説明、注意および警告については、使用説明書を参照してください。

