


INSERTIONSFÜHRUNG


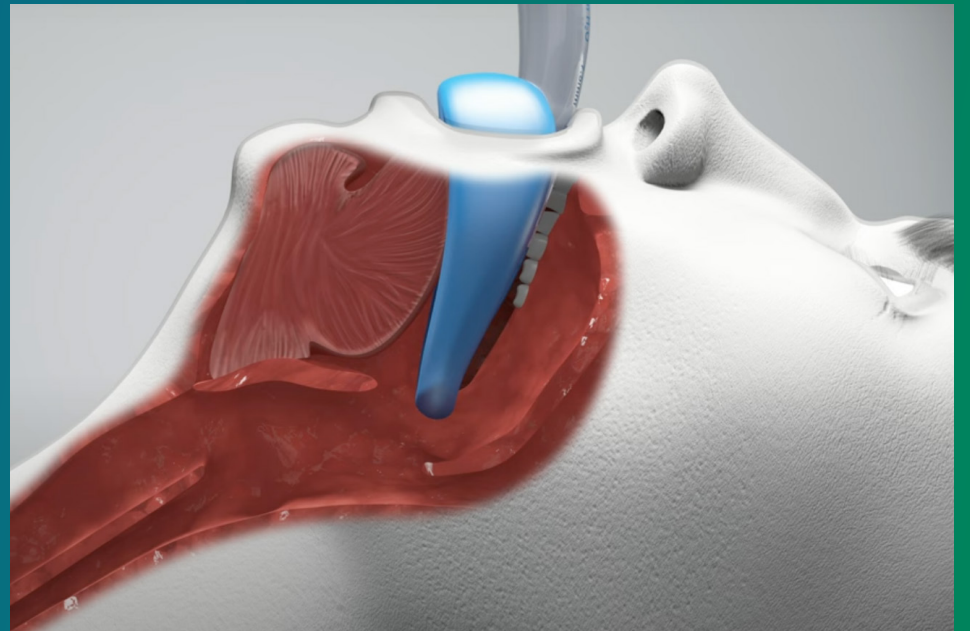


Schritt 1

Schmieren Sie die Außenflächen einschließlich der Rillen im Maskenhohlraum.

Schritt 2

Platzieren Sie den vorderen Teil der Air-Q®3 Maske in einem leichten Vorwärtswinkel zwischen dem Zungengrund und dem weichen Gaumen.

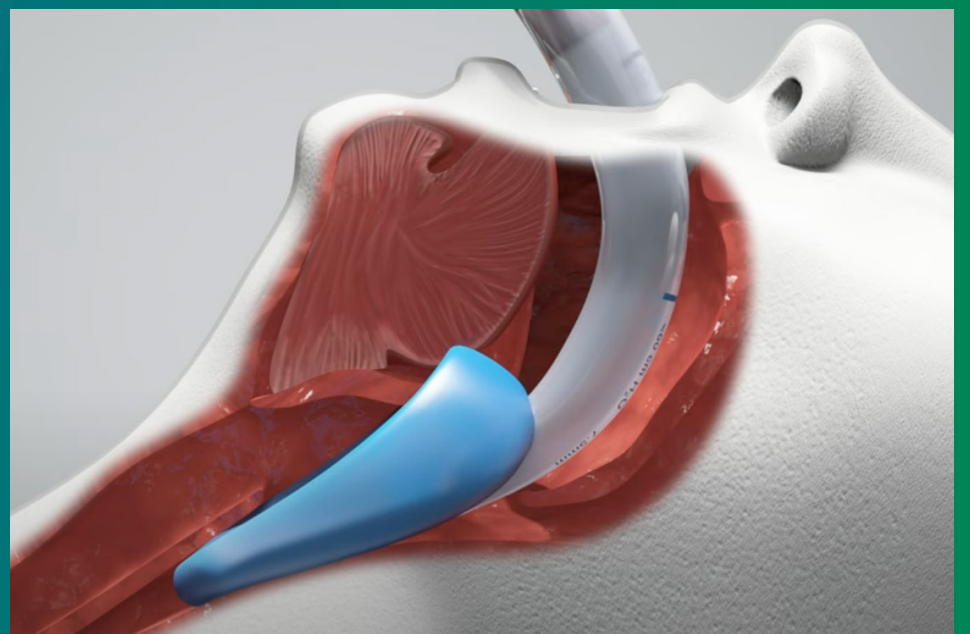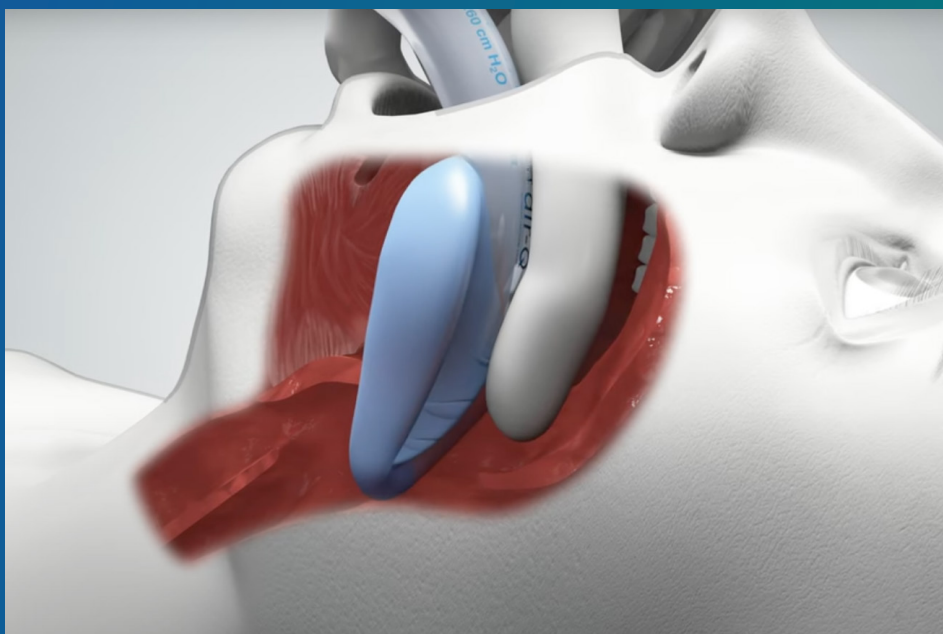

Schritt 3

Legen Sie die Rückseite des linken Zeigefingers hinter die Maske und beugen Sie den Finger nach vorne, um die Maske um die Ecke in den Rachen zu führen.

Schritt 4

Schieben Sie sie weiter vor, bis ein fester Widerstand zu spüren ist. Die korrekte Platzierung wird durch diesen Widerstand gegen weiteres Vorschieben bestimmt.